

Handbuch für den Neo Clinical Therapie- systemwagen

Installationsanleitung



Eine vollständige Bedienungsanleitung, einschließlich Warnungen, Gefahren, Indikationen und Kontraindikationen, finden Sie im Benutzerhandbuch.

- Binnenmarkt, nur USA, Informationen dazu im Benutzerhandbuch für das Vectra Neo Clinical Therapiesystem, Artikelnr. 13-7646 (Artikelnr. für CD-Version 13-7647).
- Internationaler Markt, Informationen dazu im Benutzerhandbuch für das Intellect Neo Clinical Therapiesystem, Artikelnr. 13-7651 (Artikelnr. für CD-Version 13-7652).
- Ein Exemplar des Benutzerhandbuchs erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Vertreter oder beim Kundendienst von DJO.



DJO, LLC
Ein DJO Global Unternehmen
1430 Decision Street
Vista, CA 92081-8553
Tel.: +1-800-592-7329 USA
Tel.: +1-760-727-1280
FAX: +1-760-734-5608
DJOGlobal.com

©2013 DJO, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Handbuch für den Neo Therapiesystemwagen
13-7781 Rev C



EU Authorized Representative:
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hanovre
Deutschland
Telefon: (+49)-511-6262 8630
Fax : (+49)-511-6262 8633



KOMPONENTEN

In der gesamten Anleitung sind die Angaben „links“ und „rechts“, wenn sie sich auf die Seiten des Geräts beziehen, so zu verstehen, dass sie aus Sicht des Benutzers, der direkt vor dem Gerät steht, die jeweilige Seite bezeichnen.

Das Neo Clinical Therapiesystem ermöglicht die Installation der optionalen Modusmodule (außer Vakuummodul) durch den Benutzer. Die Module wurden speziell zur Konfiguration des Neo Clinical Therapiesystems entwickelt, um nahezu allen therapeutischen Anforderungen zu entsprechen. Die Komponenten des Neo Clinical Therapiesystems sind unten aufgeführt.

Im Lieferumfang des Wagens enthaltene Elemente:

- Drei bewegliche Schubladen
- Laufrollen, linke und rechte Seite, mit Rollen
- Innensechskantschlüssel (1), Innensechskantschrauben (6) und Unterlegscheiben (6)

HINWEIS: Wenn das Neo Clinical Therapiesystem als Tischsystem ohne Wagen bestellt wurde, wird es an einem Sockel (siehe unten) montiert. Wurde er mit Wagen bestellt, muss der Wagen montiert werden.

Kopfteil



Wagen



Wagen mit Neo-System



Module



- Stimulationskanal 1/2
- Stimulationskanal 1/2 + sEMG
- Stimulationskanal 3/4
- Laser
- Ultraschall
- Vakuum (nur international)

KOPFTEIL-WAGEN-BAUGRUPPE

Der optionale Therapiesystemwagen ist ausschließlich für die Verwendung mit dem Neo Therapiesystem entwickelt worden. Mit ihm kann der Benutzer das System mühelos innerhalb der Klinik von Patient zu Patient transportieren. Außerdem dient er zur Aufbewahrung aller Zubehörteile, Betriebsmittel und Applikatoren, die für die verschiedenen Modalitäten des Systems verwendet werden.

Benötigtes Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten): Kreuzschlitzschraubendreher Größe 2 und normaler Schraubendreher.

Nehmen Sie das Neo Clinical Therapiesystem aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob Schäden sichtbar sind. Unterrichten Sie den Spediteur sofort über etwaige Schäden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Neo-Kopfteil am Wagen zu montieren:

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Entfernen Sie das Stromkabel von der Rückseite des Geräts.
2. Entfernen Sie die obere Schublade des Wagens. Ziehen Sie die Schublade auf. Drücken Sie in entgegengesetzter Richtung auf die beidseitig angebrachten Kunststoffhebel der Schubladenschienen, siehe Abbildung. Ziehen Sie die Schublade vollständig heraus.



3. Entfernen Sie den Sockel vom Kopfteil, bevor Sie es auf dem Wagen anbringen. Lösen Sie zu diesem Zweck die vier Schrauben, die das Neo-Kopfteil unter dem Sockel befestigen. Bewahren Sie die Schrauben für die Montage des Neo-Kopfteils am Wagen auf.



4. Setzen Sie das Neo-Kopfteil auf den Wagen. Die Vorderseite des Bildschirms sollte in Richtung der Schubladen gerichtet sein.



5. Befestigen Sie das Neo-Kopfteil an dem Wagen mit den vier Schrauben, die Sie in Schritt 3 entfernt haben (siehe Abbildung).



6. Ersetzen Sie, falls erwünscht, die geschlossenen Griffe durch offene Griffe. Jeder Griff wird mit vier Schrauben befestigt, siehe Abbildung.



7. Bringen Sie die obere Schublade wieder an, die in Schritt 2 entfernt wurde.

MONTAGE/ANPASSEN DER LAUFROLLEN AN DEN NEO-WAGEN

Die Laufrollen sind bei Lieferung nicht am Neo-Wagen angebracht. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Laufrollen am Neo-Wagen anzubringen:

Montage/Anpassen der Laufrollen an den Neo-Wagen

Benötigtes Werkzeug:

- 4,76 mm Innensechskantschlüssel (im Lieferumfang enthalten)
 - Unterlegscheibe 6,35 mm Innendurchmesser, 6 Stück (im Lieferumfang enthalten)
 - Innensechskantschrauben 6,35 mm-20 x 3,18 cm, 6 Stück (im Lieferumfang enthalten)
1. Entfernen Sie die untere Schublade des Wagens. Ziehen Sie die Schublade auf. Drücken Sie in entgegengesetzter Richtung auf die beidseitig angebrachten Kunststoffhebel der Schubladenschienen, siehe Abbildung. Ziehen Sie die Schublade vollständig auf.



2. Der Wagen kann auf zwei Höhen eingestellt werden. Die Standardhöhe sehen Sie auf dem linken Bild und die abgesenkte Höhe auf dem rechten. Bestimmen Sie die gewünschte Höhe für die Erstmontage.



3. Machen Sie drei Innensechskantschrauben und Unterlegscheiben für jedes Laufrollenelement links und rechts ausfindig. Führen Sie die Schrauben mit der Hand in die entsprechenden Schlitze ein. Ziehen Sie mit dem Innensechskantschlüssel die Laufrollen fest.

HINWEIS: Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt die Höhe verstellen wollen, entfernen Sie einfach die Innensechskantschrauben, stellen Sie die Laufrollen um und führen Sie die Schrauben ein.



4. Legen Sie die untere Schublade des Wagens wieder ein.

TECHNISCHE DATEN ZUM WAGEN

	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
Kopfteil bei 45 Grad mit Sockel (Tisch)	40,3606 cm	40,3606 cm	56,007 cm	9,389362 kg
Gesenkter Wagen (mit Rollen)	60,8076 cm	66,5226 cm	69,6214 cm	13,33562 kg
Erhöhter Wagen (mit Rollen)	60,8076 cm	66,5226 cm	76,581 cm	
Kopfteil und erhöhter Wagen mit Bildschirm bei 90 Grad	60,8076 cm	66,5226 cm	134,239 cm	22,18067 kg